

# Skabelon for retningslinje

<b>Dokumentnavn</b>	<i>12 Apparatur til diagnostik og behandling</i>
<b>Dato for ikrafttrædelse</b>	<i>15/5 2015</i>
<b>Revideres senest (dato)</b>	<i>15/5 2015</i>
<b>Ansvarlig for dokumentet</b>	<i>Klaus Sejr Wiboltt</i>
<b>Godkendt af</b>	<i>Klaus Sejr Wiboltt</i>
<b>Formål</b>	<i>Sikre at apparatur til diagnostik og behandling til enhver tid er patientsikkert og fungerer korrekt.</i>
<b>Hvem gælder dokumentet for?</b>	<i>Læge og sygeplejerske</i>
<b>Fremgangsmåde</b>	<p><i>Klinikken råder over følgende apparatur:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Endoskopvaskemaskine</i></li> <li><i>- Koloskoper</i></li> <li><i>- Gastroskoper</i></li> <li><i>- Cystoskop</i></li> <li><i>- Rack til endoskoper</i></li> <li><i>- Diatermi til endoskoper</i></li> <li><i>- Sug til endoskoper</i></li> <li><i>- Instrumentvaskemaskine</i></li> <li><i>- Instrumentsterilisator</i></li> <li><i>- Operationslamper</i></li> <li><i>- Hjertestarter</i></li> <li><i>- Iltbombe</i></li> <li><i>- Medicinkøleskab</i></li> </ul> <p><i>Endoskopvaskemaskine og endoskoper er omfattet af servicekontrakt og serviceres årligt*. Servicedato anføres på logkalender/logbog. Endoskopvaskemaskine er fuldautomatisk og fejlmelder hvis endoskoper er defekte.</i></p> <p><i>Diatermi til endoskopisk brug er fuldautomatisk og vil kun fungere hvis udstyret er monteret korrekt. Indstillingen af diatermien sker i overensstemmelse med retningslinier fra Bispebjerg Hospitals endoskopiske enhed**.</i></p> <p><i>Instrumentsterilisator kontrolleres hvert kvartal med sporeprøver fra Statens Serum Institut***.</i></p> <p><i>Der forefindes ekstra pærer til operationslamper.</i></p> <p><i>Ved strømsvigt forefindes lommelygter + pandelampe så operativ procedure kan afsluttes. Funktion af lommelygter og pandelampe kontrolleres halvårligt. Anføres på logkalender/logbog.</i></p> <p><i>Hjertestarter er fuldautomatisk og fejlmelder selv med lydsignal når</i></p>

	<p><i>batteriet er ved at løbe tør. Kontrollerer endvidere selv udløbsdato på elektroder. Hjertestarter og elektroder kontrolleres halvårligt. Anføres på logkalender/logbog.</i></p> <p><i>Iltbombe er omfattet af serviceordning****. Iltbombe kontrolleres halvårligt. Anføres på logkalender/logbog.</i></p> <p><i>Medicinkøleskab kontrolleres med elektronisk termometer.</i></p> <p><i>Måleværdier trækkes hvert kvartal*****.</i></p> <p><i>*Kopi af endoskopvaskemaskine, endoskoper, sug og diatermi serviceordning med Olympus i ringbind til dokumentation.</i></p> <p><i>**Kopi af diatermindstillinger fra endoskopisk enhed Bispebjerg Hospital i ringbind til dokumentation.</i></p> <p><i>***Kopi af kontrakt med Statens Serum Institut i ringbind som dokumentation.</i></p> <p><i>****Kopi af servicekontrakt af iltbombe, AGA, som dokumentation i ringbind.</i></p> <p><i>*****Kopi af temperaturmålinger i ringbind som dokumentation.</i></p>
<p><b>Referencer</b></p>	<p><i>03 Patientsikkerhed</i></p>